

## **ALLEGATO 4 - ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE**



Utilizzare le mascherine in modo continuativo, evitando il continuo “togli e metti” che va a scapito della loro efficacia protettiva.

1. Prima di indossare mascherine chirurgiche, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.
2. Indossare guanti in lattice o altro prodotto con grado di protezione dal rischio biologico;
3. Indossare la Mascherina medico-chirurgica
  - a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera
4. Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
5. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio dalla nuca.
6. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani senza togliere i guanti, usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. (il guanto a protezione del rischio biologico permette di poter lavare le mani ed igienizzarle fino a 20 lavaggi)
7. smaltire le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo (cambiare le mascherine almeno tutti i giorni) inserendole in un sacchetto dei rifiuti senza toccare la parte anteriore. Togliere i guanti come da procedura e metterli anch'essi nel sacchetto. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione”).
8. Igienizzare le mani come da procedura e in caso i vestiti